



Инструкция по эксплуатации

TU 8

Благодарим Вас за выбор продукции Ortonica.

Убедительно просим Вас перед началом эксплуатации стула с санитарным оснащением ознакомиться с инструкцией по применению.

Содержание

1. Общая информация

1.1	Назначение.....	2
1.2	Область применения.....	2
1.3	Ответственность.....	2
1.4	Примечания.....	2
1.5	Указания по технике безопасности.....	3
1.6	Особенности стула.....	4

2. Распаковка и сборка

2.1	Комплектация.....	5
2.2	Распаковка и сборка.....	5

3. Эксплуатация

3.1	Пересаживание.....	7
-----	--------------------	---

4. Регулировки

4.1	Изменение высоты стула.....	8
4.2	Стояночные тормоза.....	8

5. Технические характеристики

6. Техническое обслуживание и уход

7. Гарантийное обслуживание

1. Общая информация

1.1 Назначение

Стул с санитарным оснащением предназначен для облегчения ухода за тяжелобольными и инвалидами с нарушением функций опорно-двигательного аппарата.

Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.

1.2 Область применения

Стул с санитарным оснащением используют как в стационарных медицинских учреждениях, так и в домашних условиях.

1.3 Ответственность

Изготовитель несет ответственность только при использовании изделия в заданных условиях и в соответствии с предусмотренным назначением. Изготовитель рекомендует использовать изделие надлежащим образом и осуществлять уход в соответствии с данной инструкцией. Изготовитель не несет ответственности за повреждение вследствие использования неразрешенных элементов и запасных частей.

1.4 Примечания

Обновление последней редакции инструкции по эксплуатации Вы найдете на нашем сайте ortonica.ru

Значение символов



Обратите внимание



Шестигранный ключ
№ 4; 6; 9



Важная информация



Воспользуйтесь
плоской отверткой



Воспользуйтесь
крестовой отверткой



Воспользуйтесь
накидным ключом



Актуальность инструкции по эксплуатации

Высокий уровень безопасности и качества стульев с санитарным оснащением обеспечивается постоянным их совершенствованием. Это может стать причиной неполного соответствия между описанием и фактическим исполнением санитарного стула.

1.5 Указания по технике безопасности



Для безопасной эксплуатации стула с санитарным оснащением необходимо соблюдать меры предосторожности и следовать правилам техники безопасности.

Перед усаживанием пациента в стул с санитарным оснащением на колёсах убедитесь, что колеса зафиксированы тормозами.

Опасность получения травмы при посадке. При пересаживании следует заранее поднять опоры для стоп вверх и откинуть подножки.

Предохраняйте стул с санитарным оснащением от ударов и повреждений.

Не допускайте прикосновения санитарного стула к электрическим проводам.

1.6 Особенности стула



2. Распаковка и сборка

2.1 Комплектация



В комплект входят:

- картонная коробка 1 шт.;
- стул с санитарным оснащением (в комплекте) 1 шт.;
- инструкция по эксплуатации 1 шт.

2.2 Распаковка и сборка



Стул с санитарным оснащением упакован в картонную коробку, которую мы рекомендуем сохранить. Поставка стула с санитарным оснащением осуществляется, как правило, в полностью смонтированном и сложенном состоянии.

Достаньте все детали из коробки. Для приведения стула с санитарным оснащением в состояние эксплуатационной готовности достаточно выполнить несколько простых ручных операций:

1. Установите санитарное ведро.



2. Установите сиденье и крышку.




3. Вставьте спинку в разъемы на раме.



3. Эксплуатация

3.1 Пересаживание

Помните, совершая пересаживание, во всех случаях лучше воспользоваться сторонней помощью, чтобы предупредить возможность получения травм.

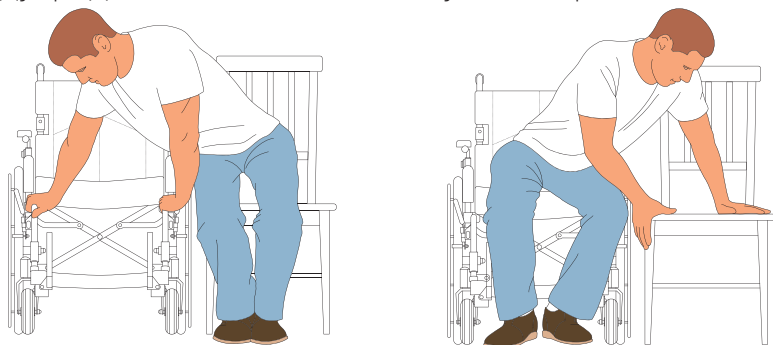


Общие правила пересаживания:

1. Как можно ближе расположите стул с санитарным оснащением к месту пересаживания, либо к себе, если пересаживаетесь на стул с санитарным оснащением.
2. Пересаживание осуществляйте только на ровных поверхностях, избегая наклонные.
3. Заблокируйте колеса тормозами.
4. Откиньте подлокотники.
5. При пересаживании со стула с санитарным оснащением, удерживаясь руками за устойчивую опору, не зависимую от стула, перенесите вес тела на руки и осуществите высадку со стула. При пересаживании на стул с санитарным оснащением необходимо опереться одной рукой о раму санитарного стула и совершить пересаживание.

4. Регулировки

4.1 Изменение высоты стула

Санитарный стул регулируется по высоте. Чтобы отрегулировать высоту стула, необходимо зажать кнопки-фиксаторы на ножке, изменить ее высоту.

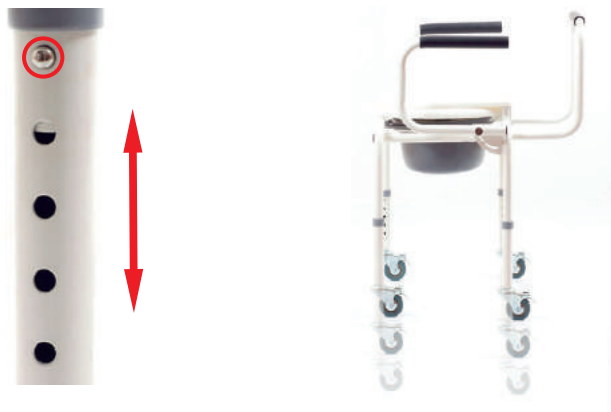

4.2 Стояночные тормоза

Стул с санитарным оснащением оборудован стояночными тормозами слева и справа. Для фиксации колес нажмите на фиксатор.



5. Технические характеристики

Ширина сиденья (варианты исполнения), мм	460
Общая длина, мм	500 - 600
Общая ширина (варианты исполнения), мм	570
Высота спинки (нерегулируемая), мм	240
Глубина сиденья (нерегулируемая), мм	480 - 580
Угол наклона спинки (нерегулируемый)	90°
Вес стула (варианты исполнения), кг	8,4
Грузоподъемность, кг	130

Данные размеры приведены справочно и могут быть изменены без согласования с потребителем. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию стула с санитарным оснащением, не ухудшающие его потребительских свойств.

6. Техническое обслуживание и уход

Рекомендуется ежемесячно проверять соединения передних и задних колес, на отсутствие люфтов, степень загрязнения подшипников, степень износа рамы, резьбовые соединения; проводить визуальный контроль быстроизнашивающихся деталей (например, колес, подшипников).

Обладая определенными техническими навыками, Вы сможете самостоятельно производить обслуживание узлов изделия, способствуя их безотказной работе:

- Необходимо периодически снимать передние колеса и очищать их от грязи и волос, а также обследовать на предмет повреждений. Очищайте пластиковую поверхность неагрессивным чистящим средством. Двигающиеся части слегка смазывайте машинным маслом.

- Периодически проверяйте затяжку резьбовых соединений. Любые резьбовые соединения не должны крутиться от руки без сопротивления.

Уход

Санитарное ведро рекомендуется санировать после каждого использования. Очистку производить с помощью активных моющих средств.

Допускается влажная очистка пластмассовых деталей, элементов рамы и колес агрессивными чистящими средствами, после чего эти элементы необходимо хорошо высушить.

7. Гарантийное обслуживание

Модель: Ortonica TU 8

Гарантийный срок эксплуатации: 1 год

Производитель: «Джензианг Ашуре Медикал Экуипмент Ко. Лтд.», Китай, ZhenJiang Assure Medical Equipment Co. Ltd. NO.3. factory, Xingdingmao Industry Park, Dingmao Development Zone, Zhenjiang city, Jiangsu Province, China.

Импортер в России: ООО «Медрус»

Адрес: 394026 г. Воронеж, Московский пр-т, 11

Тел: +7 (473) 300-31-91

По вопросам гарантийного обслуживания Вы можете обратиться по телефону: 8-800-333-60-42

по почте: service@ortonica.ru



8-800-333-60-42

ortonica.ru